

# Gebrauchsanweisung kurz



**vanraam**  
Let's all cycle



O-Pair<sup>2</sup>




Van Raam BV  
Aaltenseweg 56  
7051 CM Varsseveld  
Niederlande

Tel. : +31 (0)315 257370  
E-mail : [info@vanraam.nl](mailto:info@vanraam.nl)  
Internet : [www.vanraam.nl](http://www.vanraam.nl)

## Sattelhöhe

Die Sattelhöhe ist korrekt eingestellt, wenn der Fahrer auf dem Rad sitzt und einen Fuß auf die Pedale stellt, welches sich in der untersten Pedalstellung befindet. Stellen Sie die Sattelhöhe so ein, dass das Bein in dieser Position gestreckt, aber dennoch entspannt ist.

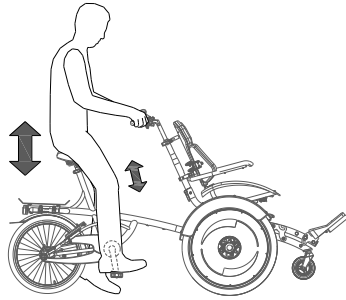

So verstellen Sie den Sattel:


1. Öffnen Sie den Schnellspanner [A].
2. Schieben Sie den Sattel in die passende Höhe.
3. Schließen Sie den Schnellspanner.



*Der Schnellspanner muss so sitzen, dass keinerlei Kleidung an ihm hängenbleiben kann!*



*Sollte der Spanner zu leicht schließen, ist die Spannkraft zu niedrig. Öffnen Sie in diesem Fall den Spanner und drehen Sie die Stellmutter [B] etwas mehr an. Ist jedoch ein extrem großer Kraftaufwand erforderlich, um den Spanner zu schließen, muss die Stellmutter etwas gelöst werden.*

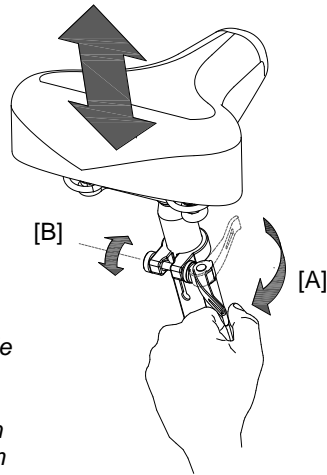

Die Sattelstütze **nicht weiter** als bis zur Markierung herausziehen. Ansonsten steckt das Rohr nicht tief genug im Rahmen, und es besteht das Risiko des Abbrechens. Das kann zu schweren Verletzungen führen.




## Sitzrückenlehne

Stellen Sie die Position der Rückenlehne und der Seitenlehne für den Passagier ein.


Fangen Sie mit der Höhe der Rückenlehne und der Armlehne an. Um diese einzustellen:

1. Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Mutter des obersten Bügels ein wenig. Lösen Sie mit einem Imbusschlüssel die beiden Schrauben des untersten Bügels ein wenig.
2. Schieben Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Die Rückenlehne ist korrekt eingestellt wenn der Passagier die Unterarme entspannt auf dem Ampel Stern abstützen kann. Ziehen Sie danach Mutter und Schrauben wieder an.

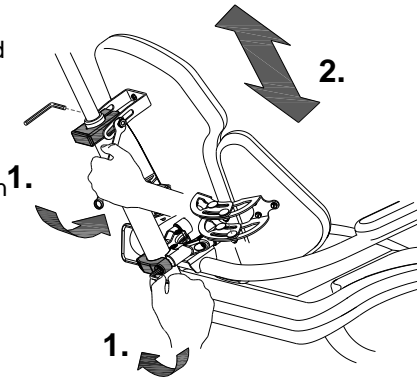

Danach bringen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Um diese einzustellen:

1. Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel die Mutter des obersten Bügels ein wenig.
2. Verlagern Sie die Rückenlehne soweit, bis der Passagier komfortabel sitzt. Ziehen Sie danach die Mutter wieder an.

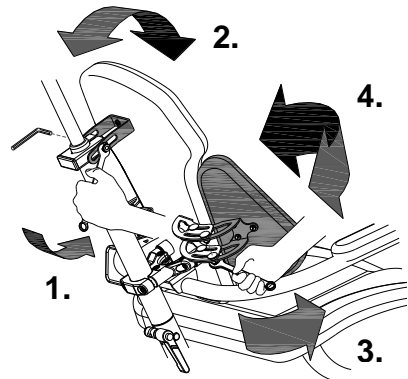


Positionieren Sie abschließend die Seitenstützen. Um diese einzustellen:

3. Lösen Sie mit einem Schraubenschlüssel an beiden Seiten die vier Muttern der Rückenlehne ein wenig.
4. Drücken Sie die Seitenstützen gegen den Körper, bis der Passagier komfortabel sitzt. Ziehen Sie anschließend die Muttern wieder an.


## Fußstützen Sitz

Stellen Sie die Position und den Stand der Fußstütze auf den Passagier ein. Um diese einzustellen:


1. Bestimmen Sie zuerst die richtige Position der Fußstütze. Dies hängt von der Beinlänge des Passagiers ab. Durch Lösen des Drehknopfes kann die Stütze aus der Halterung genommen und ein Loch weiter befestigt werden.

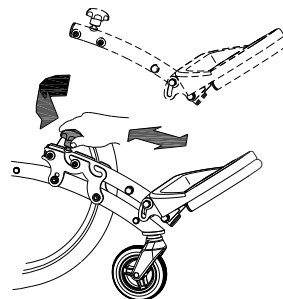


2. Sollten diese Positionen nicht zureichend sein, gibt es noch eine weitere Stellmöglichkeit. Die beiden Scheiben der Halterung können jeweils ein Loch weiter nach vorne oder nach hinten montiert werden. Um dies zu tun:  
Lösen Sie die Schrauben komplett mit einem Imbusschlüssel und verschieben Sie die Scheiben bis zu den gewünschten Löchern.  
Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder an.

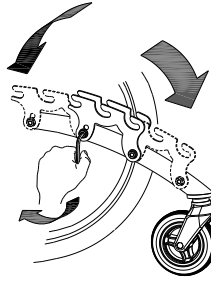

3. Um die Position der Fußstütze einzustellen:  
Lösen Sie die Schraube der Fußstütze mit einem Schraubenschlüssel und bringen Sie die Stütze in die gewünschte Position, bis der Passagier komfortabel sitzt.  
Ziehen Sie anschließend die Schraube wieder an.

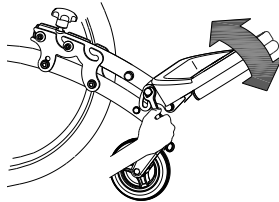

4. Sollten diese Positionen nicht zureichend sein, gibt es noch eine weitere Stellmöglichkeiten. Die Fußstütze kann eine Position weiter nach vorne oder nach hinten montiert werden. Um dies zu tun:  
Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel und verschieben Sie die Fußstütze bis zu den gewünschten Löchern. Ziehen Sie anschließend die Schrauben wieder an.

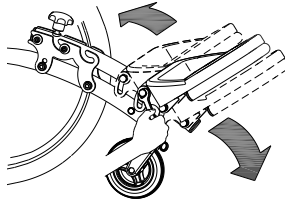


### Beckengurt Sitz

Ziehen Sie den Gurt um den Körper und klicken ihn in den Schnappverschluss. Durch drücken des roten Knopfes löst sich der Gurt wieder.

Einstellen des Gurtes auf den Passagier:

1. Öffnen Sie die Gurtklemme.
2. Ziehen Sie die Gurtklemme an bis der Gurt am Körper des Passagiers anliegt. Schließen Sie danach die Gurtklemme wieder.

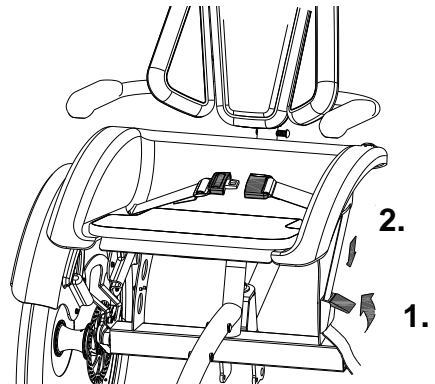


Der Elektromotor hat folgende Funktionen:

- Unterstützung während der Fahrt
- Starthilfe
- Rückwärtsgang

Drücken sie auf den An-/Aus-Knopf, um den Motor einzuschalten. Nachdem das System eingeschaltet wurde, ist der Elektromotor im Stand 1 aktiv.

Taste 1 bietet leichte Unterstützung und Taste 3 bietet die maximale Unterstützung. Während der Fahrt können Sie den Gang wechseln.

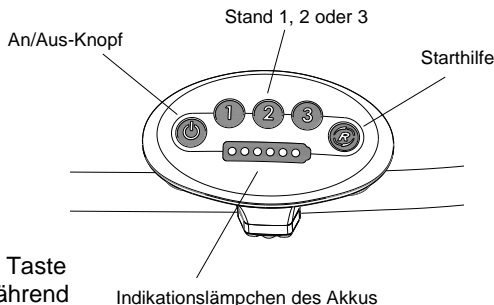

Der Motor hat eine Starthilfe. Hiermit kann der/die Fahrer/in bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h. beschleunigen, ohne selbst mitzutreten. Um zu beschleunigen, drücken Sie auf den Knopf und halten Sie ihn eingedrückt. Der Motor wird erst nach einige Sekunden aktiviert.

Den Rückwärtsgang aktivieren Sie, indem Sie vom Stillstand aus rückwärts treten. Innerhalb einiger Sekunden wird der Motor aktiviert und das Dreirad fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 km/h rückwärts, wenn Sie weiter treten.



Lassen Sie sich nicht durch unerwartete Geräusche des Elektromotors erschrecken. Wenn Sie z.B. an der Ampel warten und sich die Pedale spielerisch rückwärts drehen, wird der Rückwärtsgang aktiviert und das Dreirad wird rückwärts fahren.

Mit dem An-/Aus-Knopf schalten Sie das System aus. Wenn das System nicht gebraucht wird, schaltet es sich nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch aus.

Den Akkuladestand können Sie am farbigen Indikationslämpchen ablesen. Wenn nur noch das rote Lämpchen leuchtet, ist der Akku beinahe leer und muss aufgeladen oder durch einen neuen, aufgeladenen Akku ersetzt werden.

Wenn alle Lämpchen blinken, ist der Akku leer und der Motor kann Sie nicht mehr beim Fahren unterstützen.



Wenn Sie den Elektromotor 8 Tage nicht benutzen, wechselt der Akku in den Schlafmodus. Das dient dem Schutz des Akkus. Sie müssen den Akku dann für einige Sekunden an das Ladegerät anschließen, um ihn wieder zu aktivieren.



Wenn Sie neben dem Fahrrad herlaufen, immer den Motor ausschalten.

## Aufladen des Akkus:

Für die beste Leistung und einen guten Zustand des Akkus empfehlen wir Ihnen, den Akku im Haus bei Zimmertemperatur aufzuladen.

So laden Sie den Akku auf:




1. Öffnen Sie das Schloss mit einer Vierteldrehung des Schlüssels.
2. Ziehe den Griff nach vorn.
3. Ziehe den Akku aus dem Halter.
4. Nehmen Sie den Akku mit ins Haus. Stecken Sie das Ladegerät **zuerst** in den Steckkontakt des Akkus.
5. Stecken Sie **danach** den Stecker des Ladegerätes in die Steckdose. Setzen Sie den Schalter [A] auf An. Die grüne LED des Ladegerätes beginnt schnell zu blinken und das Ladegerät ist am Laden.



**Achtung!** Wenn die Lader nicht richtig angeschlossen ist, blinkt die grüne LED langsam.

6. Abhängig vom Akkustatus (und der Kapazität) beträgt die Ladezeit ca. 1,5 Stunden. Wenn die grüne LED dauernd leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.
7. Sobald der Akku aufgeladen ist, **zuerst** den Stecker aus der Steckdose ziehen.
8. **Danach** die Steckverbindung der Akkus aus der Steckverbindung des Ladegerätes holen.

Eventuell kann der Akku auch direkt im Halter aufgeladen werden.

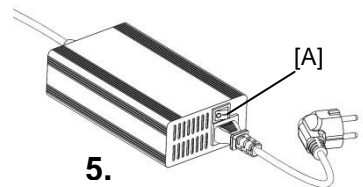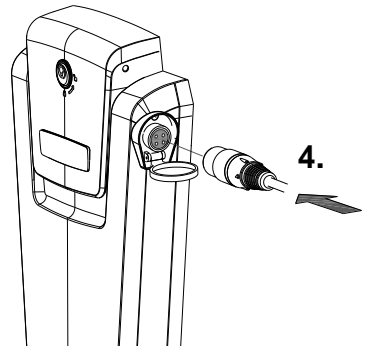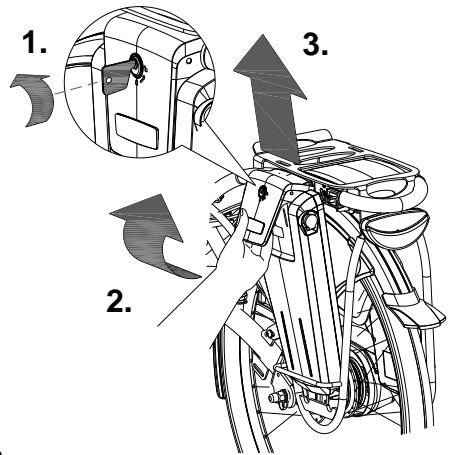



Beim Aufladen **zuerst** den Aufladepunkt des Akkus anschließen und erst **danach** den Stecker in die Steckdose stecken! Nach dem Aufladen **zuerst** den Stecker aus der Steckdose ziehen und **danach** das Ladegerät von dem Akku entfernen!



Wenn die LED auf das Ladegerät Rot blinkt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und brauche das Ladegerät nicht mehr. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Ihrem Händler.

9. Setzen Sie den Akku wieder zurück in die Halterung. Indem Sie den Akku hinter die Befestigungsstrebe [A] heben. Drücken Sie dabei den Akku fest auf den unteren Befestigungsstreifen [B].
10. Ziehen Sie den Griff nach vorne und drücken Sie den Akku fest mit der Oberkante gegen den Controller an.
11. Dann Schließen Sie den Griff und schließen das Schloss wieder zu.

Eventuell kann der Akku auch direkt im Halter aufgeladen werden.

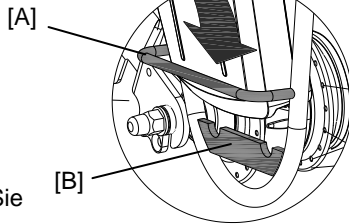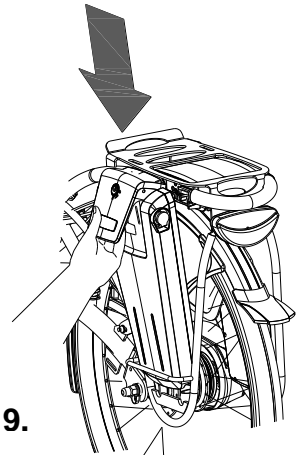


### Parkbremse

Benutzen Sie die Parkbremse stets, wenn Sie das Rad abstellen und zurücklassen.

Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie die linke Bremse ein [A] und verriegeln die Bremse mit dem kleinen Hebel [B].

Indem Sie die Bremse kräftig eindrücken, wird diese wieder entriegelt.

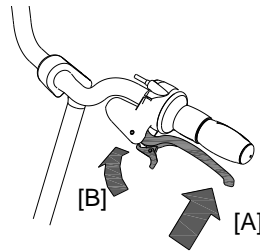

### Gangschaltung

Das Fahrrad hat 8 Gangschaltungen. Die Gangschaltung bedienen Sie, indem Sie an den Handgriffen drehen. Während des Verstellens **nicht treten**.

**Optional:** Wann das Fahrrad mit einem Elektromotor ausgestattet ist, ist es vorsehen von einer 6 gang Umwerferschaltung. Dann sollten sie **wohl treten** bei Verstellens.

