

La liste utile pour rester en sécurité sur le Fun2Go de vanRaam

S'entraîner avec le Fun2Go pour la première fois

Entraînez-vous d'abord en tant que passager

Puis entraînez-vous en tant que conducteur avec un instructeur ou un accompagnateur expérimenté comme copilote

Entraînez-vous à prendre les virages

Entraînez-vous à freiner

Entraînez-vous à utiliser l'aide au démarrage

Entraînez-vous à reculer

Entraînez-vous sur les ralentisseurs et les rampes et franchissez-les toujours tout droit

Entraînez-vous à vous habituer aux dimensions du vélo surtout à l'arrière

Rester en sécurité sur la route

Chaque trajet est différent. C'est pourquoi il est important de bien faire attention à la personne assise à côté de vous à l'endroit où vous roulez et aux conditions. Une conduite calme met le passager en confiance et rend le trajet agréable pour vous deux.

Le conducteur principal est toujours responsable de l'utilisation sûre du tandem côte à côte.

La vitesse maximale recommandée est de 15 km/h. Cette vitesse est souvent plus confortable et plus sûre pour le passager. La limite technique du Fun2Go électrique est de 20 km/h.

Roulez lentement dans les virages. Un tricycle peut basculer lorsque les virages sont pris à grande vitesse.

Roulez uniquement sur une surface plane et ferme. Choisissez de préférence des pistes cyclables larges, calmes et facilement accessibles.

Soyez particulièrement prudent en cas de pluie de verglas ou de neige. La distance de freinage peut être plus longue et la surface peut être glissante.

Vérifications avant chaque trajet:

Réglez correctement le siège

Réglez correctement le guidon

Vérifiez que le siège et le guidon sont solidement fixés

Vérifiez que les freins fonctionnent correctement

Vérifiez la pression des pneus

Assurez-vous que la pression des pneus est d'au moins 3 bar

Vérifiez que l'éclairage fonctionne

Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée

Vérifiez que les roues le guidon et la selle ne présentent ni jeu ni bruit inhabituel

Avant de partir vérifiez que la ceinture de sécurité est attachée

Vérifiez que les pieds du passager sont correctement positionnés ou solidement maintenus

Utilisez les repose-pieds si nécessaire

Ne roulez pas sous l'influence de l'alcool de drogues ou de médicaments qui affectent votre comportement à vélo

Faites également attention aux vêtements du passager

Nous recommandons de porter un casque

En route en toute sécurité avec le Fun2Go

Bon à savoir

De nombreux tandems côte à côte Fun2Go sont équipés d'un moyeu à vitesses intégrées. La position B est destinée au pédalage thérapeutique par le copilote. Utilisez cette position jusqu'à une vitesse maximale de 10 km/h.

La fonction marche arrière s'active lorsque vous pédalez vers l'arrière.

En marche arrière, les pédales du copilote peuvent également tourner vers l'arrière. Cela peut entraîner un risque de coincement lors de l'utilisation de repose-pieds ou de la plaque repose-pieds.

Stationnement, montée et descente du vélo

Il est plus facile de monter et de descendre lorsque le vélo est parfaitement immobile. Prenez votre temps et sécurisez correctement le vélo. Guidez le passager étape par étape.

Serrez d'abord le frein de stationnement. Vérifiez que le vélo est stable et laissez le passager monter ou descendre calmement.

Ne laissez jamais le passager seul sur le vélo.

Verrouillez le vélo lorsque vous le laissez sans surveillance.

Pentes et obstacles

Lorsque vous roulez sur des pentes, des ralentisseurs et des obstacles, il est plus important de rester calme que d'aller vite. Regardez bien devant vous. Réduisez votre vitesse et franchissez toujours les obstacles tout droit.

Ne roulez pas sur des pentes de plus de 10%.

Roulez lentement sur les pentes et freinez à temps en descente.

Vous êtes à l'arrêt sur une pente ?
Démarrez calmement et penchez-vous légèrement vers l'avant.

Le vélo recule sur une pente ?
Freinez progressivement.

N'empruntez pas de pentes raides avec un support pour déambulateur, un support pour fauteuil roulant ou un panier plein.

Scannez le code QR



Nom:.....

Numéro de téléphone:.....