

TWINNY

Zweirad-Tandem



Beim Twinny ist das Auf- und Absteigen durch den geräumigen Tiefeinstieg einfach. Es wurde mehr Raum zwischen dem Sattel der vorderen Person und dem Lenker des Beifahrers geschaffen, wodurch Sie nicht zu dicht beieinander sitzen. Sie können selbst bestimmen, auf welche Weise Sie zusammen Radfahren möchten. Durch den optionale schalbare Freilauf können sie entscheiden ob und wie ihr Beifahrer mit tritt. Mit der Leerlaufnabe bestimmt der Fahrer wie der Beifahrer mittreten kann. Bei Lenkung an der Vorderseite hat die Leerlaufnabe zwei Stufen welche gebraucht werden können:

- Die Pedalen des Beifahrers bewegen zusammen mit den Pedalen des Fahrers. Der Beifahrer kann seine Pedalen nicht stil halten.
- Die Pedalen des Beifahrers können unabhängig von den Pedalen des Fahrers bewegen und drehen im Leerlauf. Der Beifahrer kann nicht mittreten.

Bei Lenkung an der Hinterseite ist noch eine dritte Stufe zu gebrauchen. In diesem Fall kann der Beifahrer mittreten aber tritt unabhängig vom Fahrer. Für dieses Fahrrad sind viele Optionen erhältlich, so gibt es unter anderem eine teilbare Variante. Außerdem können Sie optional die Steuerung an die Rückseite montieren lassen. Weil wir jedes Fahrrad einzigartig herstellen, können Sie die vordere und hintere Rahmenhöhe nach Ihren eigenen Wünschen anpassen lassen. Mit einem Elektromotor haben sie eine komfortable Tretunterstützung, die das Fahren auf diesem Tandem noch viel einfacher macht.

GEEIGNET FÜR:

Zwei erwachsene Personen, die beide keine Gleichgewichtsprobleme haben und Bewegung und sozialen Kontakt wichtig finden.

TECHNISCHE DATEN

Innenbeinlänge	77 - 89 cm
Standard Rahmenhöhe	52 cm (anpassbar)
Einstiegshöhe	V 37 cm, H 44 cm
Gewicht Rad	+/- 35 kg
Radlänge	259 cm
Radbreite	66 cm



Detachable
frame



Transfer Ständer



Schaltbare
Nabe

