

Gebrauchsanweisung kurz



vanraam
Let's all cycle

Fun2Go




Van Raam BV
Aaltenseweg 56
7051 CM Varsseveld
Niederlande

Tel. : +31 (0)315 257370
E-mail : info@vanraam.nl
Internet : www.vanraam.nl


Sattelposition

Die Sattelposition ist korrekt eingestellt, wenn der Fahrer auf dem Rad sitzt und einen Fuß auf das Pedal setzt, welches sich in der am weitesten vom Fahrer entfernten Position befindet. Stellen Sie die Sattelhöhe so ein, dass das Bein in dieser Position gestreckt, aber dennoch entspannt ist.

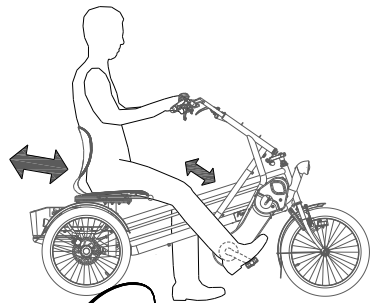

Um den Sitz zu verstellen:

1. Ziehen Sie den Hebel hoch.
2. Schieben Sie den Sitz in die richtige Position und lassen den Hebel wieder los.

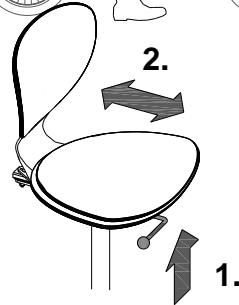


Elektrosystem Silent

Der Elektromotor hat folgende Funktionen:

- Unterstützung während der Fahrt
- Starthilfe
- Rückwärtsgang

Drücken sie auf den An-/Aus-Knopf, um den Motor einzuschalten. Nachdem das System eingeschaltet wurde, ist der Elektromotor im Stufe 1 aktiv.

Stufe 1 bietet leichte Unterstützung und Stufe 3 bietet die optimale Unterstützung. Während der Fahrt können Sie den Gang wechseln.

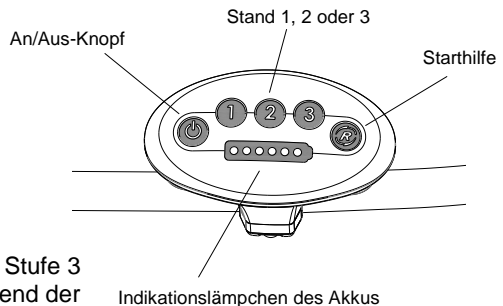

Der Motor hat eine Starthilfe. Hiermit kann der/die Fahrer/in bis zu einer Geschwindigkeit von etwa 5 km/h. beschleunigen, ohne selbst mitzutreten. Um zu beschleunigen, drücken Sie auf den Knopf und halten Sie ihn eingedrückt. Der Motor wird erst nach einige Sekunden aktiviert.

Den Rückwärtsgang aktivieren Sie, indem Sie vom Stillstand aus rückwärts treten. Innerhalb einiger Sekunden wird der Motor aktiviert und das Dreirad fährt mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 km/h rückwärts, wenn Sie weiter treten.



Lassen Sie sich nicht durch unerwartete Geräusche des Elektromotors erschrecken. Wenn Sie z.B. an der Ampel warten und sich die Pedale

spielerisch rückwärts drehen, wird der Rückwärtsgang aktiviert und das Dreirad wird rückwärts fahren.

Mit dem An-/Aus-Knopf schalten Sie das System aus. Wenn das System nicht gebraucht wird, schaltet es sich nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch aus.

Den Akkuladestand können Sie am farbigen Indikationsdisplay ablesen. Wenn nur noch das rote Lämpchen leuchtet, ist der Akku beinahe leer und muss aufgeladen oder durch einen neuen, aufgeladenen Akku ersetzt werden.

Wenn alle Lichter blinken, ist der Akku leer und der Motor kann Sie nicht mehr beim Fahren unterstützen.



Wenn das Fahrrad geschoben wird immer den Motor ausschalten.



Wenn Sie den Elektromotor einige Tage nicht benutzen, Schaltet sich der Akku in den Schlafmodus. Das dient dem Schutz des Akkus. Sie müssen den Akku dann für einige Sekunden an das Ladegerät anschliessen, um ihn wieder zu aktivieren, oder sie Fahren mit dem Rad nach Vorne und drücken auf den An-/Aus-Knopf um das Systeme wieder Ein zu schalten.

Aufladen des Akkus:


Für die beste Leistung und lange Lebensdauer des Akkus empfehlen wir Ihnen, den Akku im Haus bei Zimmertemperatur aufzuladen. So laden Sie den Akku auf:

1. Öffnen Sie das kleine Schloss mit einer Vierteldrehung des Schlüssels.
2. Drücken Sie das Schloss ein und ziehen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand den Akku aus dem Halter.
3. Nehmen Sie den Akku mit ins Haus. Stecken Sie das Ladegerät **zuerst** in den Steckkontakt des Akkus.
4. Stecken Sie **danach** den Stecker des Ladegerätes in die Steckdose. Setzen Sie den Schalter [A] auf An. Die grüne LED des Ladegerätes beginnt schnell zu blinken und das Ladegerät ist am Laden.



Achtung! Wenn die Lader nicht richtig angeschlossen ist, blinkt die grüne LED langsam.



5. Abhängig vom Akkustatus (und der Kapazität) beträgt die Ladezeit ca. 4 Stunden. Wenn die grüne LED dauernd

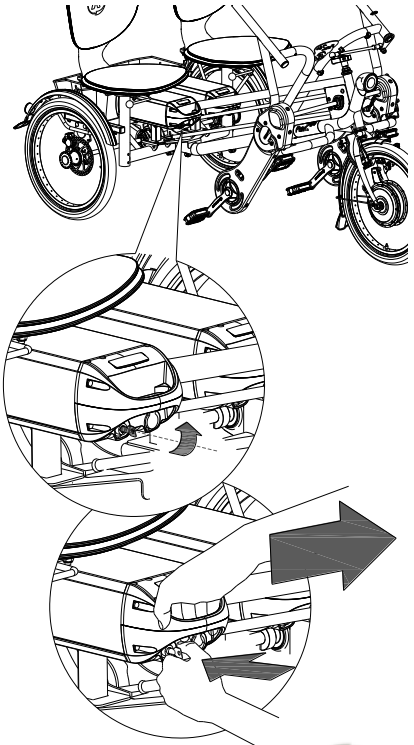

leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.

6. Sobald der Akku aufgeladen ist, **zuerst** den Stecker aus der Steckdose ziehen.
7. **Danach** die Steckverbindung der Akkus aus der Steckverbindung des Ladegerätes holen.
8. Bringen Sie die Akkus wieder in den Halterungen des Rades an und schließen Sie die Schlösser.


Eventuell kann der Akku auch direkt im Halter aufgeladen werden.

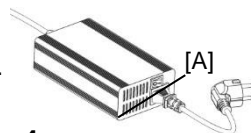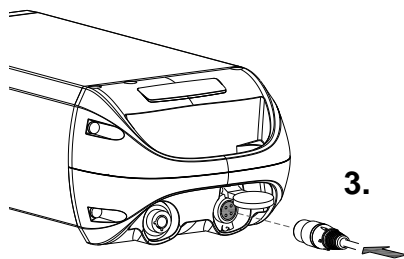

Wenn die LED auf das Ladegerät Rot blinkt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benutze das Ladegerät nicht mehr. In diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Ihrem Händler.

Parkbremse

Benutzen Sie die Parkbremse stets, wenn Sie das Rad abstellen und zurücklassen und beim auf und absteigen.

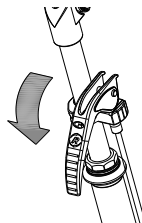

Gangschaltung

Das Fahrrad hat 8 Gangschaltung. Die Gangschaltung bedienen Sie, indem Sie an den Handgriffen drehen. Während des Verstellens **nicht treten**.

